

DOST
MASKE[®]

YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

www.dostmaske.com

DOST MASKE ÜRÜNLERİ KULAK ACITMAZ.

Maske kullananların en büyük şikayeti, uzun süre kullanımda kulakların tahriş olmasıdır.

Dost Maske, özel dokulu kulak dostu lastiklerle bu sorunu ortadan kaldırdı.

DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA



Sizi ve Sevdiklerinizi Korur..

NEDEN DOST MASKE?

DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

Hijyen
Koşullarına
Uygun Üretim

Kulak
Acıtmayan
Lastik Yapısı

Standartlara
Uygun
Hammadde

**YÜKSEK
KALİTELİ
MASKE**

Etkin
Kalite
Kontrolü

Güçlü
Dağıtım

Doğru
Paketleme

360° KONTROLLÜ ÜRETİM

DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

- Markamızın adıyla özdeş, kullanıcı dostu maskeler üretmek için çalışanlarımızı düzenli olarak eğitimlerden geçiriyoruz.
- Kendimizin güvenle kullanamayacağı hiçbir ürünü piyasaya vermiyor, bunu sağlamak için gereken tüm adımları eksiksiz atıyoruz.



Dost Maske, sadece maske üretimine tahsis edilmiş 1250 m² modern ve hijyenik tesisimizde üretilir.

DOST MASKE ÜRETİM ALANINDA UYULMASI GEREKEN 6 KURAL



ÖZEL TULUM
GİY



BONE TAK



GALOŞ GİY



MASKENİ
ÇIKARMA



ÜRÜNE
ELDİVENSİZ
DOKUNMA



YİYECEK VE
İÇECEKLE
GİRME

Hijyen koşullarına uygun 7/24 şeffaf üretim

**DOST MASKE'YE
SİZDEN ÖNCE KİMSE DOKUNMAZ**

**DOST
MASKE**
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

- Dost Maske Kutu tasarımları, hijyen koşullarını ve sağlıklı maske kullanımını önceleyecek şekilde yapıldı.
- * **Sıradan maskelerde sizden önce kutunun açılmadığından emin olamazsınız!**



- Her kutudaki emniyet bandı maskenin kullanıcıya güvenli ve sağlıklı ulaşmasını güvence altına alır.
- Emniyet bantları ürünün üretim tarihi ve LOT numarasını içerir.
- LOT numarası karşılaşılabilecek problemlere karşı ürünün künye görevini görür, takibi kolaylaştırır.

- Kutu tasarımında yer alan üstten açılan pencere maske alırken diğer maskelere dokunmayı engelleyerek sağlıklı maske kullanımını destekler.

Maske kutusunu ilk siz açın!

TÜM AVRUPA'NIN KULLANDIĐI
SAĐLIKLI, GÜVENLİ VE
KALİTELİ MASKE

DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

Dost Maske'nin satıřta olan tüm ürünleri Avrupa ülkelerine ihraç ettiđimiz maskelerle aynı kalitededir.



Cilt Dostu Ürünler



**% 99'a Kadar
Bakteri Koruması**



**El deđmeden
Üretim**



**Avrupa Standartlarında
CE Belgeli**



**Sađlık Bakanlıđı
ÜTS Kayıtlı**



**ISO Kalite
Belgeli**

Mobil cihazlarınıza indireceđiniz "UTS Mobil" uygulaması ile kutu üzerinde bulunan barkodu okutarak ürün güvenliđini test edebilirsiniz.

Dosdođru maske; DOST MASKE

360° KONFORLU KULLANIM

DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

**KULAK DOSTU
ÖZEL DOKULU LASTİK**

**YÜZE TAM UYUMLU
BURUN TELİ**

**NEME DAYANIKLI
ANTI-BAKTERİYEL
NON-WOVEN
KUMAŞ**

**%99'a kadar
KORUMA SAĞLAYAN
MELTBLOWN
FİLTRE**

- Dost Maske lastikleri, özel doku sayesinde kulaklarda baskı yapmaz kulakları acıtmaz.

Gün boyu konforlu maske kullanımının keyfini çıkarın!

KALİTE TESADÜF DEĞİL


DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

Kalite kontrol departmanımızın yaptığı düzenli kontroller, tarafsız laboratuvarlarda yaptırılan düzenli testler ve Dünya standartlarına uygunluğunu ortaya koyan belgelerimizle; sağlıklı, güvenli ve kaliteli maske tanımını baştan şekillendirdik.

Cerrahi maskeler ISO standardında ürün Tip-1, Tip-2, Tip-2R olarak gruplara ayrılır.

Değerlendirme/Test	Tip I	Tip II	Tip IIR
Bakteri Filtreleme Etkinliği	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Diferansiyel basınç (Pa/cm ²)	< 40	< 40	< 60
Sıçrama Direnci (kPa) ISO 22609 (Tip-IIR maskelerde aranır)	--	--	≥ 16.0
Mikrobiyal Temizlik (cfu/g) (Bioburden/Biyolojik yük miktarı) EN ISO 11731-1	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Tip-I: Enfeksiyon yayılım riskini düşürmek için hastalara kullanımı tavsiye edilen tip.			
Tip-II/IIR: Tıbbi personele tavsiye edilen tip.			

* Dost Tip-2 maskeler tıbbi kullanımlarda tercih edilen Tip-2R özelliklerini taşır.



TEST REPORT
DENET RAPORU

AB-6583-T
20046760
12-20

TEST SONUÇLARI
Tıbbi yüz maskeleri – Gereklilikler ve Deney Yöntemleri
EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019)

BAKTERİ FİLTREASYON VERİMLİLİK TAYINI TESTİ- BFV

Test Metodu: EN 14683:2019+AC:2019 (TS EN 14683+AC:2019)


Örnekleme ve mikrobiyal yük örnekleme haznesi arasında sıkıştırılır. Vakum sistemi yardımıyla bakteri içeren aerosol, filtreden geçirilir. Örneğin bakteri filtrasyon etkinliği, örneğin geçen koloni oluşturulan birimlerin sayısının bakteri yükü, aerosolde mevcut olan koloni oluşturulan birimlerin sayısına bölünmesiyle hesaplanabilir.

Deney Akış Hızı	28.3 L/dk
Toplam Deney Akış Süresi	2 dakika
Nümeune Ölçümleri	5 adet/maske
Test Alanı	4.8 cm ² (5 replika)
Test Kondisyonları	(21 ± 5) °C and (85 ± 5) % bağıl nem, 4 saat
Test Mikroorganizması	Staphylococcus aureus ATCC 6538
Bakteri konsantrasyonu (kobi/ml)	5x10 ⁷ kobi/ml
İnkübasyon süresi, sıcaklık	37 ± 2 °C, 20 - 62 h
Pozitif Kontrol Numune Bakteri Sayısı Ortalaması (C)	2.83 x10 ⁷ kobi/ml
Ortalama Partikül Boyutu (MPS)	2.8 µm

SONUÇLAR			
Deney Numunesi Sayısı	Deney Numunesi Bakteri Sayısı(kobi)	Bakteri Filtrasyon Verimliliği (%)	İstenen Değer BPF (%)
1	54	99.83	Tip I ≥ 95
2	53	99.88	
3	50	99.88	
4	49	99.83	
5	48	99.83	

kob: koloni oluşturulan birim
B= (C-T) / C x 100

%B: Bakteri Filtrasyon Verimliliği
C: Kontrol numunesinde üreyen bakteri sayısının ortalaması
T: Deney numunesinde üreyen bakteri sayısı



TEST REPORT
DENET RAPORU

20015571
05-20

TEST SONUÇLARI
BAKTERİ FİLTREASYON ETKİNLİK TESTİ

Test Metodu: Bakteri Filtrasyon Etkinlik Testi-BFE (EN 14683:2019+AC:2019 EK-8 (*)
Örnekleme ve mikrobiyal yük örnekleme haznesi arasında sıkıştırılır. Vakum sistemi yardımıyla bakteri içeren aerosol, filtreden geçirilir. Örneğin bakteri filtrasyon etkinliği, örneğin geçen koloni oluşturulan birimlerin sayısının bakteri yükü, aerosolde mevcut olan koloni oluşturulan birimlerin sayısına bölünmesiyle hesaplanabilir.

Deney Akış Hızı	28.3 L/dk
Deney Akış Süresi	2 dakika
Nümeune Ölçümleri	5 x12 x10 cm ²
Mikroorganizma	Staphylococcus aureus ATCC 6538
Bakteri konsantrasyonu (kobi/ml)	5x10 ⁷ kobi/ml
İnkübasyon süresi, sıcaklık	24 saat, 35 ± 2 °C
Pozitif Kontrol Numune Bakteri Sayısı Ortalaması (C)	2.3x10 ⁷ kobi/ml

SONUÇLAR			
Deney Numunesi Sayısı	Deney Numunesi Bakteri Sayısı(kobi/ml)	Bakteri Filtrasyon Etkinliği (%)	İstenen Değer BFE (%)
1	115	99.99	Tip II ≥ 98
2	114	99.99	
3	114	99.99	
4	110	99.99	
5	110	99.99	

kob: koloni oluşturulan birim
B= (C-T) / C x 100

%B: Bakteri Filtrasyon Etkinliği
C: Kontrol numunesinde üreyen bakteri sayısının ortalaması
T: Deney numunesinde üreyen bakteri sayısı

EC DECLARATION OF CONFORMITY
CE UYGUNLUK DEKLARASYONU

Üretici : ANKA PROMOSYON ÜRÜNLERİ VE MATBAAA MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Manufacturer : ANKA PROMOSYON ÜRÜNLERİ VE MATBAAA MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : Merkez: FEVÇİSAMAK MAH. HACIBİRAM CAD. NO:45 KABAŞEHİR / KONYA / TÜRKİYE
Address : Merkez: FEVÇİSAMAK MAH. HACIBİRAM CAD. NO:45 KABAŞEHİR / KONYA / TÜRKİYE

Marka : DOST MASKE

Ürün : TIBBİ KULLANIMLIK MEDİKAL MASKELER
Product : DISPOSABLE MEDICAL MASKS

Uygulanan Yönetmelikler: Bu ürün için aşağıdaki yönetmelikler uygulanmıştır.
2001/95/EC GENEL ÜRÜN GÜVENLÜĞÜ DİREKTİFİ
93/42/AT TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

Applicable Regulations: The following regulations have been applied to this product.
2001/95/EEC GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE
93/42/EEC MEDICAL DEVICES DIRECTIVE

İlgili Standartlar : ISO 13485:2016
Related Standards

ANKA PROMOSYON ÜRÜNLERİ VE MATBAAA MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. yukarıda belirtilen ürünleri için yukarıda belirtilen ilgili standart ve yönetmelikleri tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan etmiştir.

ANKA PROMOSYON ÜRÜNLERİ VE MATBAAA MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. declares that listed products meet the essential requirements of above mentioned standards and directives

inkacert

Sertifika No : CM130420 Sertifika Tarihi : 13.04.2020 Bilgi Tarihi : 13.04.2021
Certificate No : CM130420 Certificate Date : 13.04.2020 Expiration Date : 13.04.2021

JQA **CE** **ISO 13485**

www.jqa.com.tr www.inkacert.com.tr www.iso.org

By using the CE mark, the manufacturer declares that the product complies with the requirements of the applicable standards and directives. The validity of the certificate can be checked through www.inkacert.com.tr

Dost Maske, ürünlerini düzenli olarak akredite laboratuvarlarda test etmektedir.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
&
TİCARİ AMBALAJLAR

DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

Tip 2 / 2R Yeni Nesil Dost Maskeler



Renk Seçenekleri



Beyaz



Yeşil

Ambalaj Seçenekleri



Tekli OPP



50'li Kutu

Genel Özellikler

Ürün Kodu : DM-22 Type 2 Cerrahi Maske

Malzeme : 3 Kat 70 Gr. Nonwoven Kumaş

İç katman : 20 gr Spunbond

Orta katman : 25 gr Meltblown

Dış Katman : 30 gr Spunbond

Üretim : Ultrasonic kaynak ile el değmeden üretilmiştir.

Burun teli : PP kaplamalı alüminyum tel kullanılmıştır.

Boyut : 175mmx95mm (± 2mm)


Lastik : Kulak acıtmayan özel elastik bandı.

Filtrasyon : BFE>%98
EN 14683 Standartları çerçevesinde alınan test raporları ile BFE (Bakteri Filtrasyon Etkinliği) değeri %98'den büyük olarak tescillenmiştir.



Ürün Kolisi
2000 adet

Tip 2 / 2R Dost Maskeler

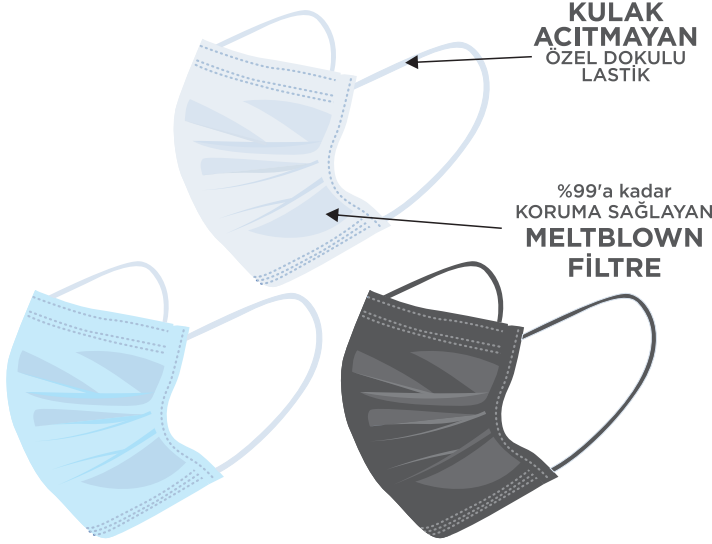

KULAK
AÇITMAYAN
ÖZEL DOKULU
LASTİK

%99'a kadar
KORUMA SAĞLAYAN
MELTBLOWN
FİLTRE



Renk Seçenekleri



Beyaz



Mavi



Siyah

Ambalaj Seçenekleri



Tekli OPP



50'li Kutu



20x10
Kasa Önü Standı



Ürün Kolisi
2000 adet

Genel Özellikler

Ürün Kodu : DM-12 Type 2 Cerrahi Maske

Malzeme : 3 Kat 70 Gr. Nonwoven Kumaş

İç katman : 20 gr Spunbond

Orta katman : 25 gr Meltblown

Dış Katman : 30 gr Spunbond

Üretim : Ultrasonic kaynak ile el değmeden üretilmiştir.


Burun teli : PP kaplamalı alüminyum tel kullanılmıştır.

Boyut : 175mmx95mm (± 2mm)

Lastik : 200 mm ebadında özel kulak acıtmayan lastik.

Filtrasyon : BFE>%98
EN 14683 Standartları çerçevesinde alınan test raporları ile BFE (Bakteri Filtrasyon Etkinliği) değeri %98'den büyük olarak tescillenmiştir.

Tip 1 Dost Maskeler

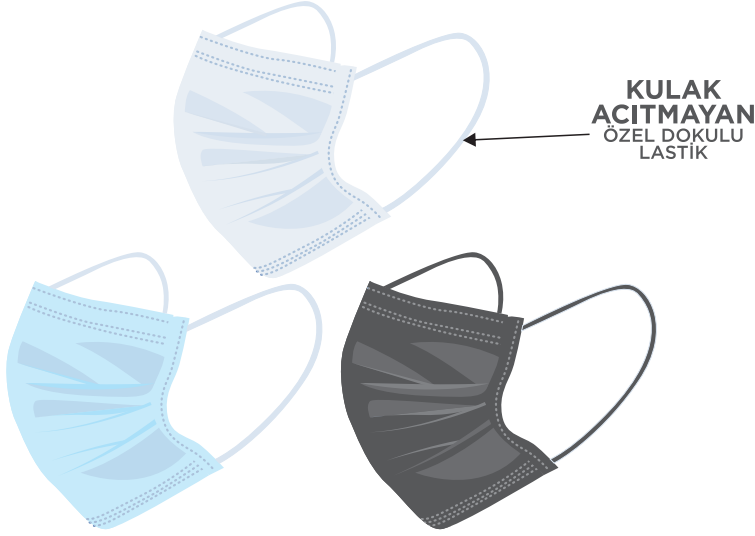

Renk Seçenekleri



Beyaz



Mavi



Siyah

Ambalaj Seçenekleri



Tekli OPP



50'li Kutu



20x10
Kasa Önü Standı



Ürün Kolisi
2000 adet

Genel Özellikler

Ürün Kodu : DM-11 Type 1 Cerrahi Maske

Malzeme : 3 Kat 70 Gr. Nonwoven Kumaş

İç katman : 20 gr Spunbond

Orta katman : 20 gr Spunbond

Dış Katman : 30 gr Spunbond

Üretim : Ultrasonic kaynak ile el değmeden üretilmiştir.

Burun teli : PP kaplamalı alüminyum tel kullanılmıştır.

Boyut : 175mmx95mm (± 2mm)

Lastik : 200 mm ebadında özel kulak acıtmayan lastik.

Filtrasyon : BFE>%95
EN 14683 Standartları çerçevesinde alınan test raporları ile BFE (Bakteri Filtrasyon Etkinliği) değeri %95'ten büyük olarak tescillenmiştir.

SATIŐ NOKTASINA KADAR
TÜM DETAYLAR


DÖST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŐİSEL KORUMA

**Kutu**

Boyut : 11x20x8 cm
Ağırlık : 175 gr
Adet : 50

**Koli**


Boyut : 41x57x34 cm
Ağırlık : 8 kg
Adet : 2.000

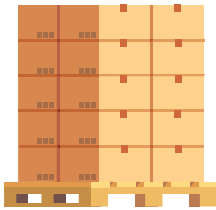**Palet**

Boyut : 80x120x185 cm
Ağırlık : 180 kg
Adet : 40.000

**Tır**


Toplam Palet : 33 Palet
Ağırlık : 7260 kg

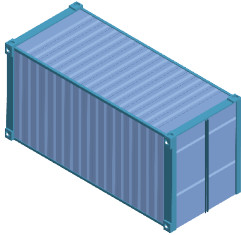**20' Konteyner**

Toplam Palet : 11 Palet
Ağırlık : 2420 kg
Adet : 528.000

**Tır (Paletsiz)**

Ağırlık : 8000 kg

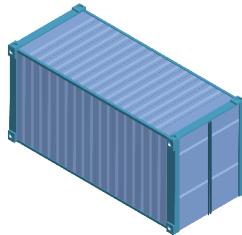**40' Konteyner**

Toplam Palet : 24 Palet
Ağırlık : 5200 kg
Adet : 1.152.000

* Yükleme ve ürün tipine göre değişebilir.

Kapıdan kapıya sorunsuz teslimat sağlıyoruz.

35 YILLIK
KURUMSAL ÜRETİM TECRÜBESİ

DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA



DOST
MASKE

Anka ailesi olarak, pandeminin işyerimizi, evimizi, ailemizi, her alanımızı sardığı ilk günlerde bu süreci atlarmaya katkı verecek bir adım atmak için gösterdiğimiz çaba sonunda Dost Maske tesisini kurduk.

dostmaske.com



Promosyon ve ofis kullanımına yönelik fonksiyonel not defteri, ajanda ve takvim koleksiyonuna sahip olan DİVAL, 2006 yılından itibaren Türkiye'nin en seçkin markalarına hizmet vermenin yanı sıra 2010 yılından itibaren de Avrupa ve ABD pazarlarında yer almaktadır.

dival.com.tr



Kurumsal hediyelik ürünlerin kişiselleştirmesi ve toptan satışı üzerine faaliyet göstermektedir.

ankapromosyon.com



Düğün davetiyesi pazarındaki kendi tasarım ve üretimimiz olan ürünlerle, İNVİTO markasıyla yer almaktayız. Dağıtım, Türkiye genelinde bayiler ve davetiye satış noktaları üzerinden gerçekleşmektedir.

invitodavetiye.com

İşimiz, üretmek!

ANKA GLOBAL

DOST
MASKE
YÜKSEK KALİTELİ
KİŞİSEL KORUMA

DOST MASK **BE**
Ooigem / Belgium

DOST MASK **CH**
Zuerich / Switzerland

DOST MASK **DE**
Halver / Germany

DOST MASK **IT**
Via di Mezzo ai Piani / Italy

DOST MASK **GB**
Colchester / United Kingdom

DOST MASK **GB**
Leatherhead / United Kingdom

DOST MASK **DE**
Eningen Unter Achalm / Germany

DOST MASK **TN**
Nabeul / Tunisia

DOST MASK **CH**
Brugg / Switzerland

DOST MASK **DK**
Skibby / Denmark

DOST MASK **CH**
Gallen / Switzerland



Avrupa'da 20'den fazla ülke DOST MASKE kullanıyor.

Maske İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Cerrahi (Medikal) Maske Nedir? : Cerrahi Maske, 3 katlı tek kullanımlık maskelerin uluslararası standartlardaki ismidir.

Steril Maske Nedir? : Steril maskeler, ameliyathaneler gibi çok özel ortamlar için özel olarak ambalajlanmış ürünlerdir. Tıbbi personelin ameliyathane dışındaki kullanımları da dahil olmak üzere halk kullanımı için üretilen maskeler Non-Steril (Steril olmayan) maskelerdir.

Non-Steril (Steril Olmayan) Maskeler Sağlıklı mıdır? : Non-Steril maskeler, kontrollü, denetlenebilir hijyenik ortamlarda üretildiği sürece sağlıklıdır.

Maskelerin Kontrollü Ortamlarda Üretildiğini Nasıl Tespit Ederiz? : Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen ürünler, ÜTS'ye (Ürün Takip Sistemi) kaydedilir. ÜTS kaydı olan ürünlerin üretim tesisleri Sağlık Bakanlığının denetimindedir.

Meltblown Nedir? Meltblown, maskede kullanılan bir kumaş türüdür. 3 katlı maskelerin orta katmanında kullanıldığında maskenin filtre kabiliyetini artırır.

Maske Üzerinde Gördüğünüz İşaretlerin Anlamları



CE işareti, maskenin AB (Avrupa Birliği) tarafından belirlenen AC36-42 kriterlerine uygunluğunu belirler. DOST MASKE CE deklarasyonuna www.dostmaske.com adresinden ulaşabilirsiniz.



TS EN 14683

EN 14683, cerrahi maskelerin fonksiyon ve temizlik olarak gerekli olan uluslararası standartları karşılaması için gerçekleştirilen test metodudur. DOST maske tüm ürünlerini akredite laboratuvarlarda düzenli olarak test ettirmektedir.

BFE

EN 14683 test metodlarından birisidir. Maskenin Bakteri Filtrasyon Etkinliğini ölçer. Dost Maske test raporlarına web sitemiz üzerindeki iletişim formunu doldurarak erişebilirsiniz.


TYPE

Yapılan test sonucuna göre
BFE değeri ≥ 95 olan maskeler TİP 1 olarak
BFE değeri ≥ 98 olan maskeler TİP 2 olarak tanımlanır.
Ayrıca, yine standartta belirlenen kan sızdırmazlık testini geçen ürünler TİP2-R olarak tanımlanır.
DOST MASKE ürün setinde TİP 1, TİP 2 ve TİP 2R maskeler bulunmaktadır.



Maskenin, Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olduğunu belirtir. ÜTS kaydı olan ürünler bakanlık denetimindedir. DOST MASKE ÜTS kaydını ÜTS Mobile uygulamasını cep telefonunuzdan kullanarak sorgulayabilirsiniz.

Maskeler Nasıl Korur?

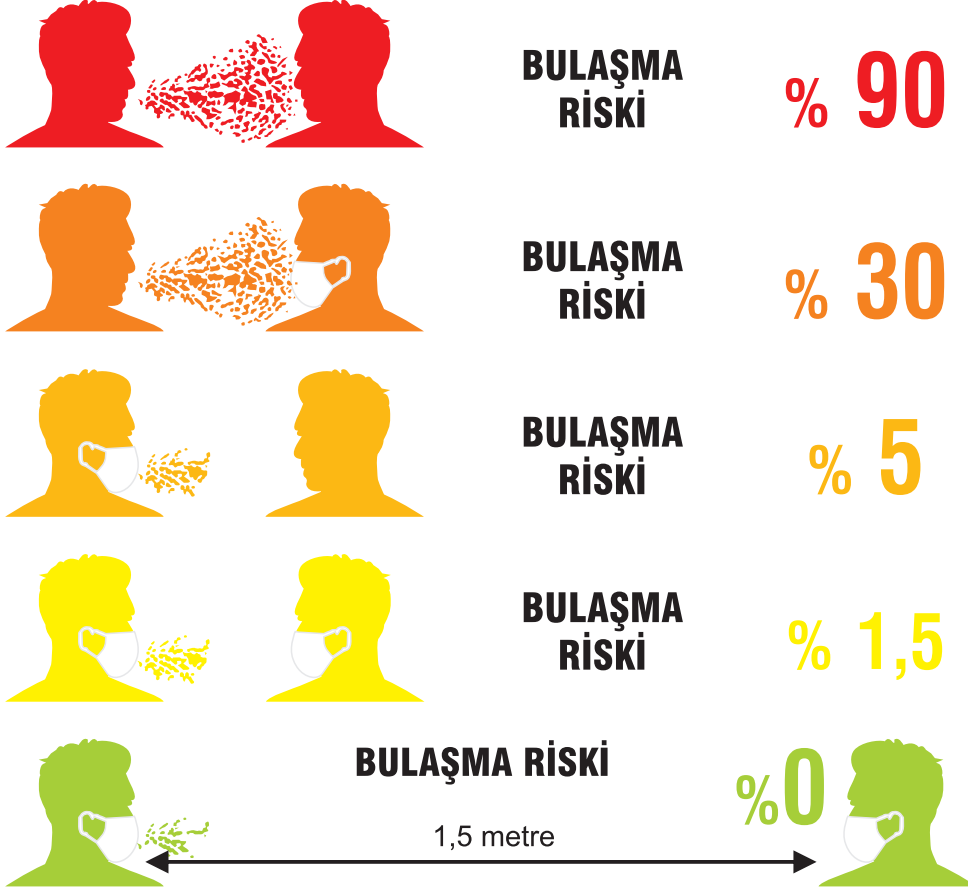

* Oranlar temsilidir.

* Maskeler, ancak karşılıklı takıldığı zaman bulaşı önler.



**anka
GROUP**

Fabrika ve Genel Müdürlük:

Fevzi Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. No:45 Karatay / KONYA
T: (332) 345 00 10

İstanbul Bölge Müdürlüğü:

Altayçeşme Mah. Efe Boz Sk. Freeland Plaza No: 12/21, 34843 Maltepe / İSTANBUL
T: (216) 455 56 00

USA Office:

44 Forshee Circle Montvale, NJ 07645 USA



www.dival.com.tr



**anka
PROMOSYON**

www.ankapromosyon.com

**DOST
MASKE**

www.dostmaske.com

Dost Maske, Dival Notebook, Anka Promosyon bir ANKA GROUP markasıdır.